

# **DIGITALIZAR**

## **(HABILITAR)**

### **PUESTA A PUNTO DE PREPARACIONES**

- Limpieza de portas
- Quitar huellas
- Alcohol de 96°
- Cubre bien puesto que no sobresalga. Si no la preparación no se digitaliza bien (golpecitos-uso bisturí)

### **DIGITALIZACIÓN INDIVIDUAL**

- (De una en una)
- Encendido de lámpara
- Colocar porta
- Seleccionar parte a Digitalizar.
- El punto azul dentro de la zona para digitalizar pero fuera de la biopsia o citología
- Seleccionar puntos de enfoque manual ó el mismo lo hace.
- Si tenemos problemas por una tinción leve o escaso material usamos el video monitor.
- Si está todo listo damos la orden para digitalización.
- Cuando termina comprobamos que se ha digitalizado correctamente y si no es así volvemos a meter + puntos de enfoque usando el video monitor
- Cuando termina comprobamos que se ha digitalizado correctamente y si no es así volveremos a meter + portas de enfoque usando el video monitor. Cuando todo es correcto metemos dato. El él listado Esta tarea ahora no se hace porque el aparato lee el código y la preparación queda automáticamente con su numero de biopsia o citología correspondiente.

### **DIGITALIZA LA MAQUINA**

- Cogemos los Raks máximo 15 portas hasta 8 Raks y dejamos que trabaje varias horas para ello:
  - Llenamos los Raks de portas (limpios)
- Seleccionamos el 1ª y le damos la misma orden como si se fuera a Digitalizar individual.

- Seleccionar zona Digitalizar
- Puntos de enfoque
- Colocar el punto Azul bien
- Si algún Rak va incompleto se anular esos puestos
- Cuando termina en la pantalla todo lo digitalizado aparece colores

**Verde-----Bien**

**Amarillo—Regular**

**Rojo-----Mal**

Cogemos lo que está regular y digitalizamos a mano